


ISTRUZIONI ED INFORMAZIONI DEL FABBRICANTE

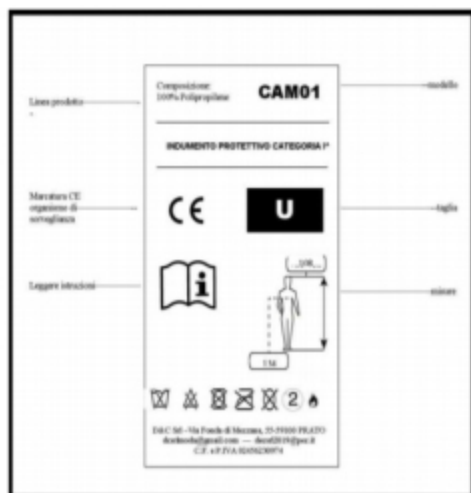

Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per danni causati da uso improprio del DPI o in disaccordo con i contenitori delle presenti istruzioni.

DESCRIZIONE PRODOTTO

Camice avvolgente in PLP girocollo, nessuna tasca, chiusura posteriore con laccetti al collo e laccio in vita, elastico ai polsi. Colore bianco e colorato. Taglia UNICA.

IMPIEGO

E' un indumento destinato al personale impiegato in attività del settore medicale ed ospedaliero e di pronto soccorso. Il camice assicura igiene e protezione da rischi minori. Può essere abbinato con eventuali dispositivi previsti per i casi specifici.

MODALITA' DI INDOSSO

Togliere l'indumento dalla confezione, infilare le braccia e indossarlo facendo in modo di non lacerare il tessuto. Chiudere annodando i lacci.

NB: Le caratteristiche di protezione sono valide solo se l'indumento è correttamente indossato. D&C Srl non si assume alcuna responsabilità per uso improprio degli indumenti.

AVVERTENZE

Non effettuare modifiche al capo. Controllare che il capo sia integro ed esente da difetti (fori, scuciture, ...). L'indumento monouso deve essere sostituito dopo ogni intervento. Abbandonare subito la zona di lavoro in caso di strappi o scuciture dell'indumento. L'indumento di protezione non deve essere aperto o rimosso in presenza di atmosfere infiammabili o esplosive o durante l'uso di sostanze infiammabili o esplosive.

CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO

L'indumento deve essere conservato in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Se non contaminato può essere equiparato a un rifiuto urbano. Se contaminato deve essere trattato come rifiuto pericoloso e smaltito secondo le norme di legge in vigore.

DURATA

Si consiglia l'utilizzo entro 5 anni dalla data di produzione.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Il dispositivo è classificato in I° Cat. Marcatura CE rispondente ai requisiti essenziali di salute e sicurezza del Regolamento UE 2016/425.